

Uživatelská příručka

**Název výrobku: Vysokozátěžové sterilizační obaly Stericlin „BLUE LINE“
(kombinace netkaná textilie / fólie)
s indikátory parní, formaldehydové a etylenoxidové sterilizace**
dle DIN EN ISO 11607-1, -2
- vysokozátěžové role ploché
- vysokozátěžové sáčky ploché

Katalogové číslo: příslušná katalogová čísla viz katalog na www.unibal.cz

Postup při použití:

Vysokozátěžové sterilizační obaly Stericlin „BLUE LINE“ ve formě vysokozátěžových rolí plochých a vysokozátěžových sáčků plochých jsou vyrobeny z netkané textilie gramáže 60 g/m² a 7-vrstvé fólie PETP/PP s lehce namodralým zabarvením. Slouží jako sterilizační obaly pro parní, formaldehydovou a etylenoxidovou sterilizaci. K tomu jsou tyto obaly vybaveny třemi indikátory sterilizace - třída 1 dle ČSN EN ISO 11140-1. Indikátory jsou umístěny mimo aktivní zónu obalu a na straně fólie.

! Velmi vhodné pro balení operačních sít a těžkých kovových předmětů.

1. Uzavírání sterilizačních obalů se provádí výhradně svařováním na impulsních nebo průběžných svářečkách sterilizačních obalů. Jiný způsob uzavírání sterilizačních obalů je nepřipustný. Doporučená svařovací teplota je cca 180 °C, správnou pevnost sváru je však nutno vždy přezkoušet. Zásada je postupovat vždy od nižší teploty, až svár získá potřebnou pevnost. Pevnost sváru po svaření musí být o něco vyšší, než pevnost původních průmyslových svárů na obalech. **POZOR!** Při vyšších teplotách dochází k zahnědnutí sváru a k degradaci fólie a pevnost sváru klesá.
2. Otevírání sterilizačních obalů se provádí ve směru bezvláknového otvírání (peel efekt) podle značky, natištěné na obalu.
3. Po sterilizaci mění indikátory barvu následovně:
 - indikátor páry z červené na hnědou
 - indikátor formaldehydu z fialové na zelenou
 - indikátor etylenoxidu z bílé na žlutou
4. Sterilizační obaly se doporučuje plnit cca na 3/4 jejich maximálního obsahu. Za svařovaným svárem by měly zůstat 2 - 3 cm, aby u skládaných obalů mohlo dojít ke správnému svaření.
5. Pokud uživatel chce použít dvojité balení, je nutno vložit vnitřní obal tak, aby přišla netkaná textilie na netkanou textilií a fólie na fólii.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na firmu Unibal s.r.o.

Uvedený výrobek můžete objednávat na adrese:

UNIBAL s.r.o., Za Hřištěm 2567/10, 370 10 České Budějovice
tel.: 385 342 762, fax: 385 345 013, e-mail: unibal@unibal.cz

04/2009