

Uživatelská příručka

Název výrobku: **Sterilizační obalové materiály v arších**


- balicí krepové papíry
- netkané textilie
- netkané textilie dvojité
- wrapp
- interleave

Katalogové číslo: příslušná katalogová čísla viz katalog na www.unibal.cz

Postup při použití:

- balicí krepové papíry jsou dodávány v barvě bílé, zelené a modré. Barva neznamená rozdílnou kvalitu, slouží pouze k rozlišování při praktickém použití, jednotlivé barvy lze i kombinovat.
- netkané textilie jsou dodávány v barvě modré a zelené a v různých gramážích - viz katalog.
- netkané textilie dvojité - v kartonu se střídají archy modrý a zelený.
- wrapp 5 plus (5-vrstvý, extrémně pevný obalový materiál) je dodáván v barvě na jedné straně modré, na druhé fialové, kdy barva slouží pouze k barevnému rozlišení při balení. Materiál je vhodný i pro plasmovou sterilizaci.

1. Uzavírání balicích materiálů v arších provádějte výhradně podle níže uvedeného postupu (obálková metoda):

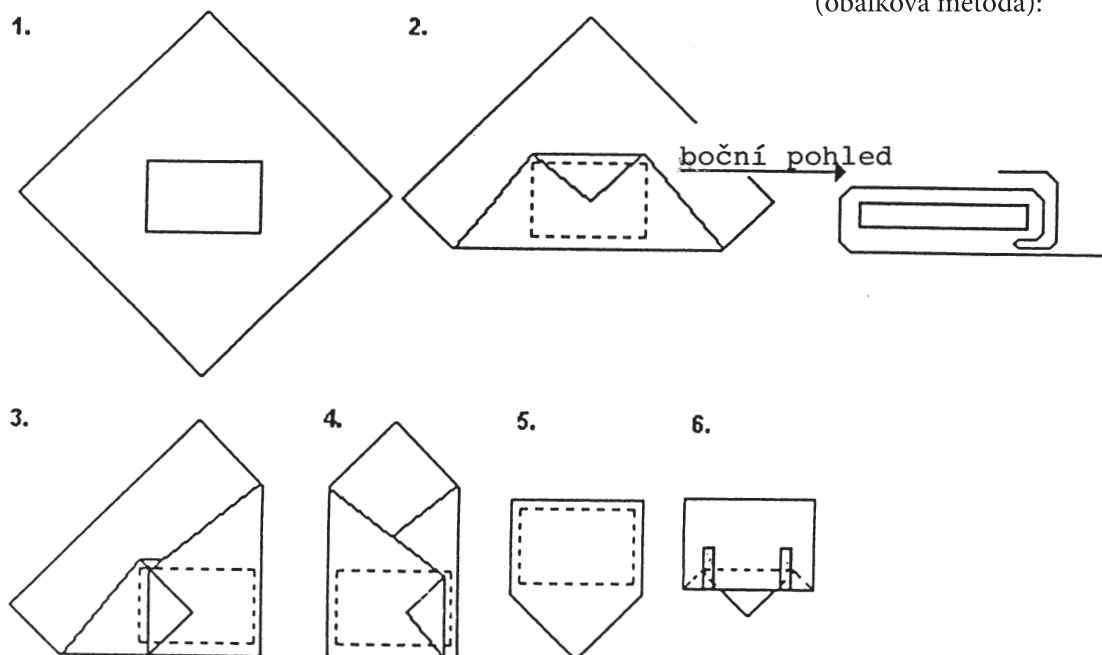

2. Při balení do dvou archů zabalte 1. vrstvu, pootočte o 90° a zabalte 2. vrstvu.
3. K uzavírání balicích materiálů v arších používejte lepicí pásky bez indikátorů nebo s indikátory viz katalog na www.unibal.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na firmu Unibal s.r.o.

Uvedený výrobek můžete objednávat na adrese:

UNIBAL s.r.o., Za Hřištěm 2567/10, 370 10 České Budějovice

tel.: 385 342 762, fax: 385 345 013, e-mail: unibal@unibal.cz

04/2009