

Uživatelská příručka

Název výrobku: Průhledné sterilizační obaly Stericlin (kombinace papír / fólie) s indikátory parní, formaldehydové a etylenoxidové sterilizace
dle DIN EN ISO 11607-1, -2

- průhledné role ploché, průhledné role skládané
- průhledné sáčky ploché, průhledné sáčky skládané

Katalogové číslo: příslušná katalogová čísla viz katalog na www.unibal.cz

Postup při použití:

Průhledné sterilizační obaly Stericlin ve formě rolí plochých a skládaných a sáčků plochých a skládaných jsou vyrobeny z medicinského sterilizačního papíru gramáže 70 g/m² a 7-vrstvé fólie PETP/PP s lehce namodralým zabarvením. Slouží jako sterilizační obaly pro parní, formaldehydovou a etylenoxidovou sterilizaci. K tomu jsou tyto obaly vybaveny třemi indikátory sterilizace - třída 1 dle ČSN EN ISO 11140-1. Indikátory jsou umístěny mimo aktivní zónu obalu a na straně fólie.

1. Uzavírání sterilizačních obalů se provádí výhradně svařováním na impulsních nebo průběžných svařečkách sterilizačních obalů. Jiný způsob uzavírání sterilizačních obalů je nepřipustný. Doporučená svařovací teplota je cca 180 °C, správnou pevnost sváru je však nutno vždy přezkoušet. Zásada je postupovat vždy od nižší teploty, až svár získá potřebnou pevnost. Pevnost sváru po svaření musí být o něco vyšší, než pevnost původních průmyslových svárů na obalech. **POZOR!** Při vyšších teplotách dochází k zahnědnutí sváru a k degradaci fólie a pevnost sváru klesá.
2. Otevírání sterilizačních obalů se provádí ve směru bezvláknového otvírání (peel efekt) podle značky, natištěné na obalu.
3. Po sterilizaci mění indikátory barvu následovně:
 - indikátor páry z červené na hnědou
 - indikátor formaldehydu z fialové na zelenou
 - indikátor etylenoxidu z bílé na žlutou
4. Sterilizační obaly se doporučuje plnit cca na 3/4 jejich maximálního obsahu. Za svařovaným svárem by měly zůstat 2 - 3 cm, aby u skládaných obalů mohlo dojít ke správnému svaření. Celková váha obsahu sterilizačního obalu nesmí překročit 3 kg.
5. Pokud uživatel chce použít dvojitě balení, je nutno vložit vnitřní obal tak, aby přišel papír na papír a fólie na fólii.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na firmu Unibal s.r.o.

Uvedený výrobek můžete objednávat na adrese:

UNIBAL s.r.o., Za Hřištěm 2567/10, 370 10 České Budějovice

tel.: 385 342 762

fax: 385 345 013

e-mail: unibal@unibal.cz

12/2007