

Uživatelská příručka

Název výrobku: Sterilizační obalové materiály v arších

- balicí krepové papíry
- netkané textilie
- netkané textilie dvojité
- wrapp
- interleave


Katalogové číslo: příslušná katalogová čísla viz katalog na www.unibal.cz

Postup při použití:


- balicí krepové papíry jsou dodávány v barvě bílé, zelené a modré. Barva neznamená rozdílnou kvalitu, slouží pouze k rozlišování při praktickém použití, jednotlivé barvy lze i kombinovat.
- netkané textilie jsou dodávány v barvě modré a zelené a v různých gramážích - viz katalog.
- netkané textilie dvojité - v kartonu se střídají archy modrý a zelený.
- wrapp - extrémně pevný obalový materiál s minimální zbytkovou vlhkostí po sterilizaci je dodáván v barvě modré. Materiál je vhodný i pro plasmovou sterilizaci.
- interleave - je dodáván v kombinaci wrapp v modré barvě pro vnitřní vrstvu a soft krep v zelené barvě pro vnější vrstvu dvojbalení.

1. Uzavírání balicích materiálů v arších provádějte výhradně podle níže uvedeného postupu (obálková metoda):

A) Balicí systém „diagonální“

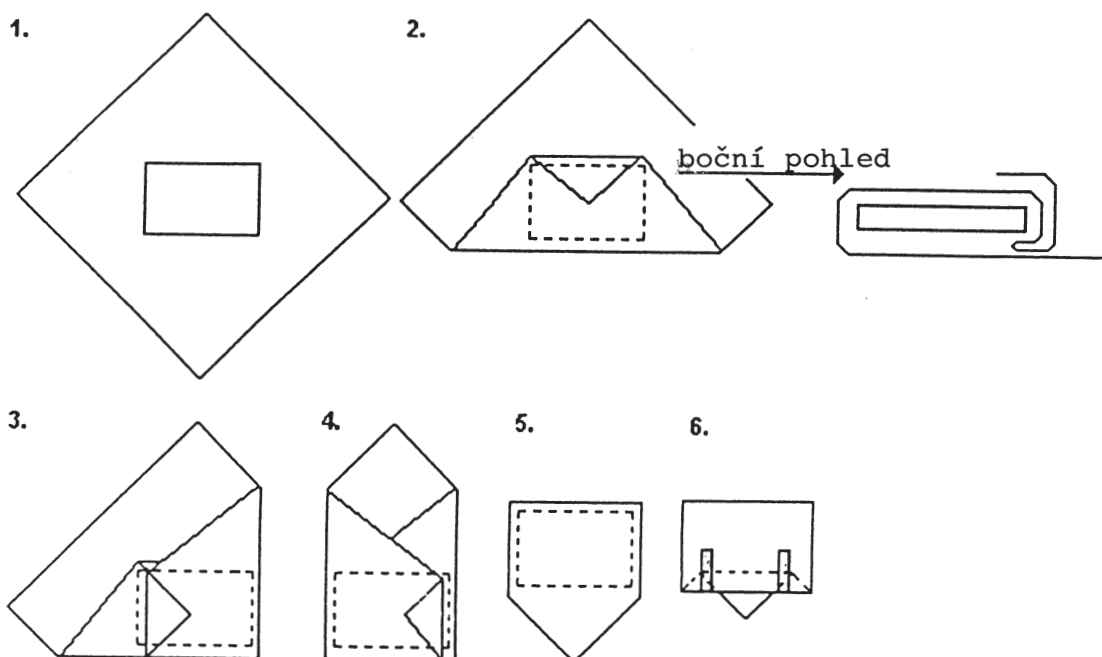

B) Balicí systém „paralelní“

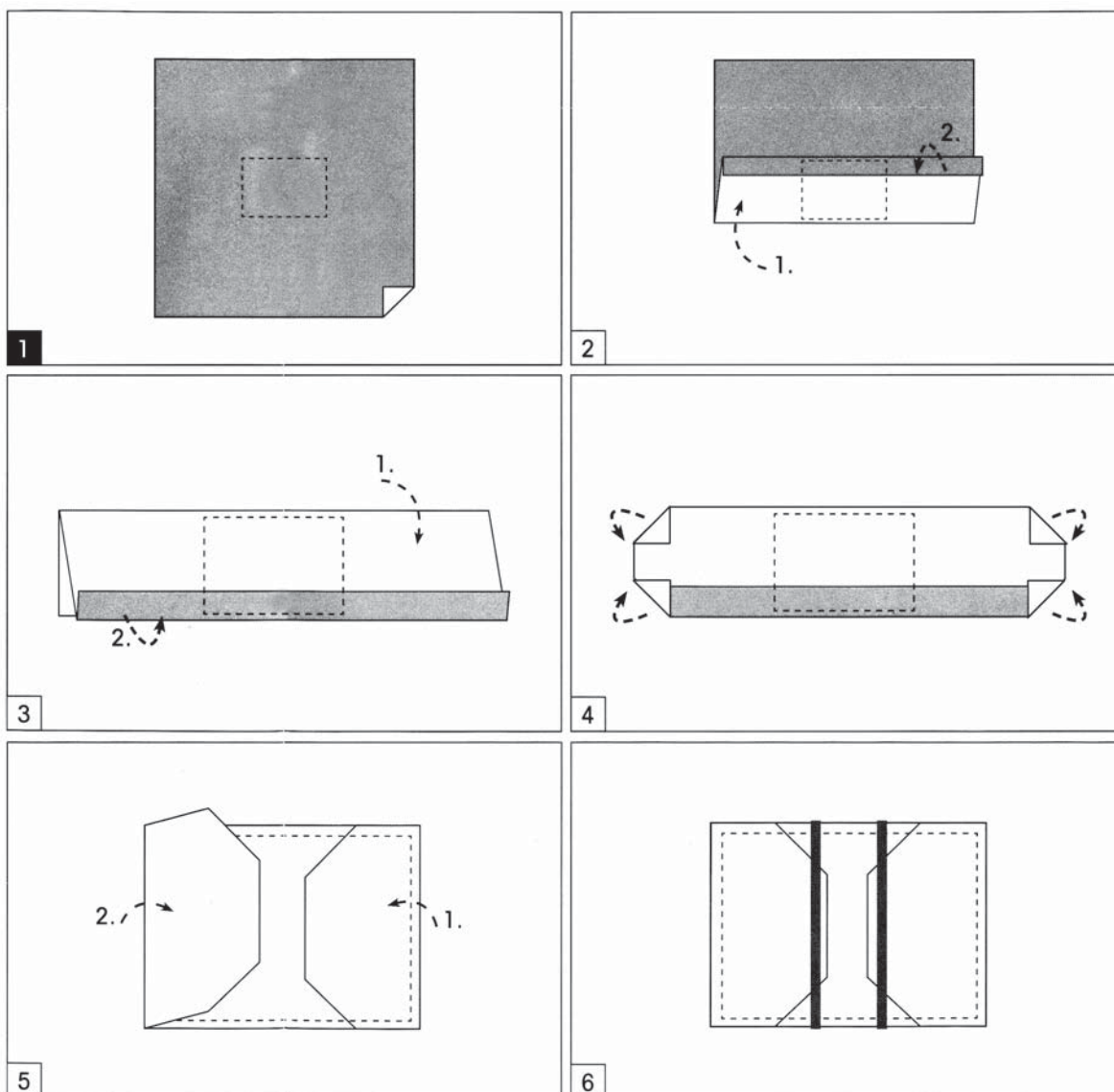

Tento systém balení je vhodný zejména u dvojbalení, kdy vnitřní vrstvu (wrap) použijeme k zarouškování stolku (pro vyložení nástrojů ze síta). Zabalení vnitřní vrstvy provedeme excentricky tak, abychom po rozbalení pokryli potřebnou plochu stolku.

2. Při balení do dvou archů (dvojbalení) zabalte 1. vrstvu, pootočte o 90° a zabalte 2. vrstvu.
3. K uzavírání balicích materiálů v arších používejte lepicí pásy bez indikátorů nebo s indikátory viz katalog na www.unibal.cz.

POZOR! Podle normy DIN 58953, díl 10 nelze zdvojený obal, kterým lze udělat pouze jeden balicí labyrint, považovat za dvojbalení s prodlouženou expirací 12 týdnů!

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na firmu Unibal s.r.o.

Uvedený výrobek můžete objednávat na adrese:

UNIBAL s.r.o., Za Hřištěm 2567/10, 370 10 České Budějovice
tel.: 385 342 762, fax: 385 345 013, e-mail: unibal@unibal.cz

10/2009