

Uživatelská příručka

**Název výrobku: Papírové sterilizační sáčky Stericlin
s indikátorem parní sterilizace** dle DIN EN ISO 11607-1, -2
- papírové sterilizační sáčky skládané

Katalogové číslo: příslušná katalogová čísla viz katalog na www.unibal.cz

Postup při použití:

Papírové sterilizační sáčky Stericlin ve formě sáčků skládaných jsou vyrobeny z medicinského sterilizačního papíru gramáže 60 g/m². Slouží jako sterilizační obaly pro parní sterilizaci. K tomu jsou tyto obaly vybaveny indikátorem parní sterilizace - třída 1 dle ČSN EN ISO 11140-1.

1. Uzavírání sterilizačních obalů se provádí výhradně svařováním na impulsních nebo průběžných svářečkách sterilizačních obalů. Jiný způsob uzavírání sterilizačních obalů je nepřipustný. Doporučená svařovací teplota je cca 180 °C, správnou pevnost sváru je však nutno vždy přezkoušet. Zásada je postupovat vždy od nižší teploty, až svár získá potřebnou pevnost. Pevnost sváru po svaření musí být o něco vyšší, než pevnost původních průmyslových svárů na obalech. **POZOR!** Při vyšších teplotách dochází k zahnědnutí sváru a pevnost sváru klesá.
2. Po sterilizaci mění indikátor barvu z červené na hnědou.
3. Sterilizační obaly se doporučuje plnit cca na 3/4 jejich maximálního obsahu. Svár provádíme cca uprostřed modrého pruhu v horní části obalu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na firmu Unibal s.r.o.

Uvedený výrobek můžete objednávat na adrese:

UNIBAL s.r.o., Za Hřištěm 2567/10, 370 10 České Budějovice

tel.: 385 342 762

fax: 385 345 013

e-mail: unibal@unibal.cz

06/2008